

# Mascareta sanitària

## de teixit de tres capes

### QUAN UTILITZAR-LA

- Com a precaució estàndard, barrera. En cap cas l'ús de la mascareta sanitària substitueix les principals mesures higièniques, com són el rentat de mans freqüent o tapar-se la boca i el nas amb la cara interna del colze o amb mocadors d'un sol ús en cas de tossir o estornudar, ni les mesures de distanciament social.
- Per mantenir l'asèpsia. Dissenyada per impedir que els agents infecciosos presents al tracte respiratori es contagiïn a d'altres persones.

### PASSOS A SEGUIR

1. Abans del seu ús o manipulació cal desinfectar les mans amb una solució hidroalcohòlica durant 30 segons, o rentar les mans amb aigua i sabó durant 50 segons.
2. Agafar la mascareta per la part central, sense tocar la capa interior.
3. Fixar la mascareta al nas ajustant la peça nasal amb una lleu pressió. No s'ha de retirar per parlar, tossir, etc...
4. Col·locar les gomes al darrera de les orelles.
5. Ajustar la mascareta entre la barbeta i el nas, assegurant que no hi ha espais lliures entre la cara i la mascareta.
6. Cal tenir cura del seu ús. Després de ser utilitzada, si està en bones condicions (no humitejada o amb pèrdua de consistència) doblegar la mascareta amb la part externa cap a l'interior i guardar-la en un recipient tancat. Quan ja no es pugui tornar a utilitzar, doblegar la mascareta amb la part externa cap a l'interior i dipositar-la en un recipient tancat per al seu rebuig.
7. Després de retirar la mascareta desinfectar les mans amb una solució hidroalcohòlica durant 30 segons, o rentar les mans amb aigua i sabó durant 50 segons.

### CARACTERÍSTIQUES

Amb elevada capacitat de filtració. Protegeix de partícules en suspensió. Amb peça nasal i cintes elàstiques de polièster i cotó per a la subjecció a les orelles. Compleix amb els requeriments de la Normativa Europea EN 14683 sobre mascaretes sanitàries - Tipus II.

**Pren les mesures necessàries per protegir-te a tu i a tots.**